



Test antygenowy wymazowy z nosa na obecność COVID-19 DOMOWY SZYBK ARIPA 0%VAT

BH 0160

Ochrona dróg oddechowych

- ? Temperatura badania: 15 30°C
- ? Temperatura przechowywania: 2 - 30°C

ZESTAW ZAWIERA:

- ? Test kasetkowy 1szt.,
- ? probówka na bufor ekstrakcyjny 1szt.,
- ? jednorazowa wymazówka 1szt.,
- ? torebka na odpady 1szt.,
- ? Instrukcja obsługi w języku polskim.

Oryginalne opakowanie musi posiadać naklejki zabezpieczające z każdej strony pudełka. Masz pewność, że nikt nie miał dostępu do zawartości opakowania.

Jak korzystać z testu na antygen nosowy?

PRZYGOTOWANIE

Przed testem umyj ręce wodą z mydłem przez co najmniej 10 sekund.

Sprawdź zawartość zestawu testowego

Upewnij się, że nie jest uszkodzony

Miej pod ręką stoper

PROCEDURA POBIERANIA WYMAZU